

Comfort-in™

Sistema de inyección SIN aguja



Indoloro



Ahorro de tiempo



Innovación




Mayor seguridad



POR FIN,

¡INYECCIONES SIN AGUJAS!

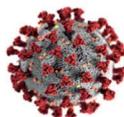


La nueva era de
prevención contra
los patógenos



Comfort-in™ es un sistema revolucionario que permite la administración subcutánea de medicamentos y vacunas. También permite el uso por el propio paciente, bajo la autorización de sus doctores, para auto-inyectarse.

Se usa habitualmente en odontología, diabetes, oncología, reumatología, medicina veterinaria, fisioterapia, anestesia local, tratamientos post-quirúrgicos, medicina estética, dolor agudo y crónico, medicina deportiva, infertilidad, disfunción eréctil, vacunas.

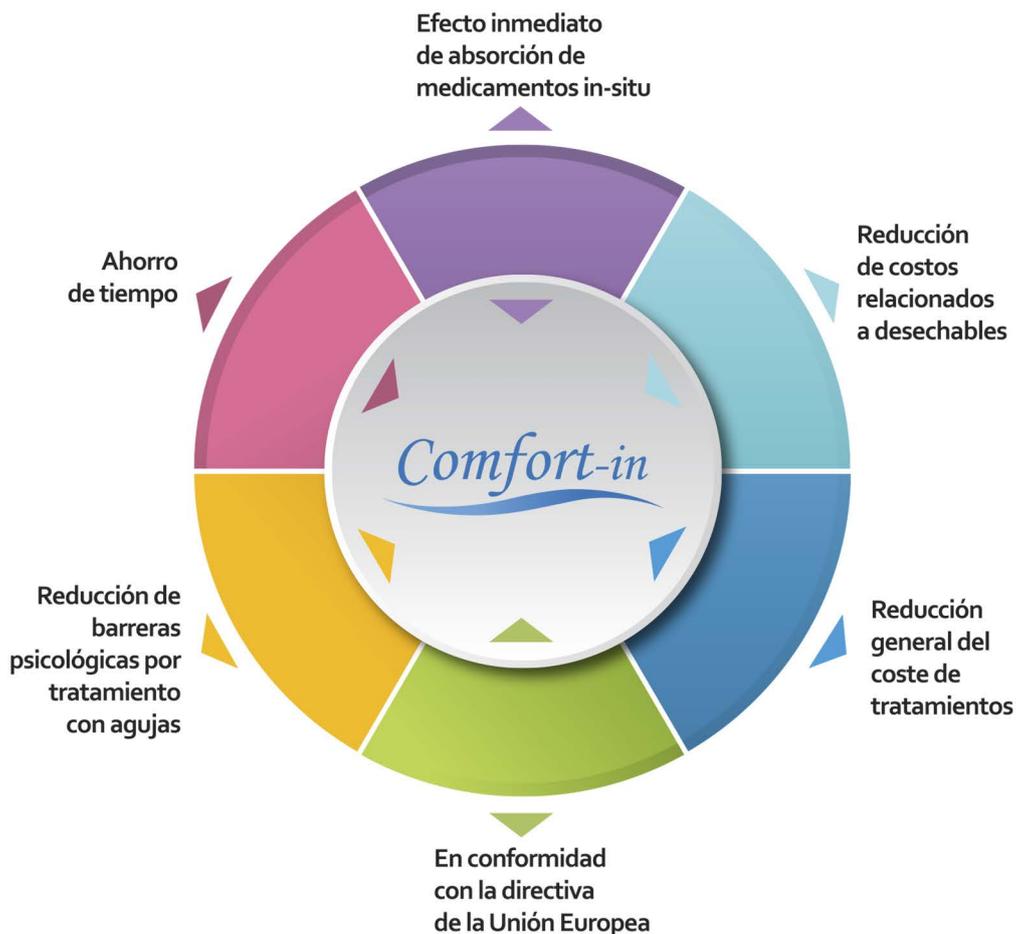

Tres velocidades diferentes para el óptimo uso de Comfort-in™ :

Normal

Para pacientes con tejido adiposo muy grueso y para áreas del cuerpo como manos y pies.

Medium

Para pacientes con tejido adiposo menos grueso y para las áreas del cuerpo donde la capa grasa es particularmente delgada, como manos y pies.

Soft

Se usa principalmente en odontología y medicina estética. Dada su velocidad reducida, puede utilizarse en todos los ámbitos de la pediatría.

Boquilla (cod. NZ-70): jeringa sin aguja, con escala graduada que puede contener hasta 0,5ml de medicamento.



Hay 5 adaptadores diferentes para retirar el medicamento de cualquier envase:



ADAPTADOR LUER (cod. AD-LUER)

Es un adaptador universal adaptable a todos los tipos de viales. AD-LUER realiza el funcionamiento de una aguja común.



ADAPTADOR VIAL (cod. AD-VIAL)

Se utiliza para extraer insulina u otras sustancias médicas de viales con 14mm de diámetro.



ADAPTADOR DENTAL (cod. AD-DENTAL)

Se utiliza para extraer medicamento de cualquier vial o cápsula dental.



ADAPTADOR PEN (cod. AD-PEN)

Es utilizado habitualmente para extraer el medicamento de los "pens" de insulina.



ADAPTADOR T-UNIVERSAL (cod. AD-T)

Fabricado para viales que tengan un diámetro igual o superior a 22mm.



El dispositivo COMFORT-in™ puede también estar provisto de tapas (cod. CAP-01/CAP-02) para la boquilla.

Las tapas están fabricadas con material de silicona; las tapas pueden ser planas u oblicuas. Para un posicionamiento correcto y confortable del dispositivo en la encía durante la anestesia dental, o para aquellas áreas del cuerpo donde la capa grasa es particularmente delgada como manos, pies, rodillas, codos y tobillos.

PREPARACIÓN:

1

Cargar el dispositivo, utilizando la caja o palanca de presión.



2

Llenar la boquilla, utilizando los adaptadores.



3

Enroscar la boquilla a tope al dispositivo.



4

Girar el dispositivo en sentido horario, hasta que se vea la primera gota, fijando con la otra mano la boquilla.



5

Presione levemente el campo a tratar y realice la infusión, mantenga el dispositivo 2-3 segundos.



Producido por:

Representante en la UE:

CE
1639



MIKAMEDICAL CO.
93 NOKSANSANEOP JUNG-RO,
GANGSEO-GU, BUSAN, REP. OF KOREA



Productos Médicos Hospitalarios, S.L.

C/Calasparra S/N • Pol. Ind. La Polvorista
30500 Molina de Segura, Murcia, ESPAÑA

Tel: 968 643 236 • Email: pmhosp@pmh.com.es

Website: <https://www.pmh.com.es>